

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης – περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης αυτού του προϊόντος. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, ρωτήστε τον οφθαλμίατρό σας, τον φαρμακοποιό σας ή επικοινωνήστε μαζί μας.

BAUSCH + LOMB

Artelac™ Splash Drops

el
Σύνθεση:
0,24 % υαλουρονικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, δωδεκαϋδρικό φωσφορικό δινάτριο, διένυδρο δισόξινο φωσφορικό νάτριο και ύδωρ για ενέσιμα.

Προοριζόμενη χρήση:
Λιπαντικό οφθαλμικό διάλυμα και μέσο ενυδάτωσης και επανυδάτωσης τόσο των μαλακών όσο και των σκληρών φακών επαφής κατά τη χρήση τους.

Τι είναι το προϊόν Artelac™ Splash Drops;
Το προϊόν Artelac™ Splash Drops είναι ένα διαυγές διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων που περιέχει 0,24 % υαλουρονικό οξύ (ως υαλουρονικό νάτριο). Η σύνθεσή του έχει πολύ υψηλή ανεκτικότητα, καθώς δεν περιέχει συντηρητικά και παρέχει γρήγορη και μακράς διάρκειας ανακούφιση από τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας. Οι οφθαλμικές σταγόνες συσκευάζονται στο καινοτόμο σύστημα πολλαπλών δόσεων χωρίς συντηρητικά (PFMD). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 6 μήνες μετά το άνοιγμα.

Ένδειξη χρήσης:
Το Artelac™ Splash Drops ενδείκνυται για την άμεση ανακούφιση και ενυδάτωση των ξηρών οφθαλμών. Φρεσκάρει με φυσικό τρόπο και καταπραΰνει τα ξηρά μάτια, ανακουφίζοντας από τα συμπτώματα των κουρασμένων, καταπονημένων, ακόμη και των δακρυσμένων ματιών. Το Artelac™ Splash Drops είναι κατάλληλο για την ενυδάτωση και επανυδάτωση τόσο των μαλακών όσο και των σκληρών φακών επαφής κατά χρήση τους και βελτιώνει σημαντικά την αίσθηση άνεσης των φακών σας, όλη την ημέρα.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το Artelac™ Splash Drops;
Το Artelac™ Splash Drops περιέχει το φυσικό ενυδατικό υαλουρονικό οξύ (ως υαλουρονικό νάτριο), το οποίο υπάρχει στις δομές του υγιούς ανθρώπινου οφθαλμού και στο φυσικό φιλμ των δακρύων.

Το Artelac™ Splash Drops είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παραμένει επάνω στην επιφάνεια του οφθαλμού παρέχοντας άμεση ενυδάτωση για όλα τα συμπτώματα των ξηρών οφθαλμών. Είναι ένα ιδανικό προϊόν για όποιον πάσχει από μια σειρά ήπιων ή μέτριων συμπτωμάτων ξηροφθαλμίας όπως τα κουρασμένα, καταπονημένα, δακρυσμένα μάτια ή αίσθηση καύσου στα μάτια.


Η ξηροφθαλμία προκαλείται (ή επιδεινώνεται) από:

- εξωτερικούς παράγοντες, όπως η εντατική χρήση υπολογιστή, ο κλιματισμός, η θέρμανση, ο καπνός των τσιγάρων, τα υπαίθρια περιβάλλοντα με δυνατό άνεμο, καθώς και η χρήση φακών επαφής.
- άλλους παράγοντες, όπως ορισμένα φάρμακα (όπως τα αντισυλληπτικά χάπια, τα αντιισταμινικά, οι β-αναστολείς, τα αντισπασμωδικά και τα διουρητικά) ή ορισμένες ασθένειες που συμβάλουν στην ανάπτυξη οφθαλμικής ξηρότητας.


Πόσο συχνά και πόσο καιρό πρέπει να χρησιμοποιείτε το Artelac™ Splash Drops;
Ενσταλάξτε μία σταγόνα από το προϊόν Artelac™ Splash Drops στον οφθαλμό όποτε νιώσετε την ανάγκη. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά και όσο συχνά θέλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός στη διάρκεια χρήσης.

Πως να χρησιμοποιήσετε το Artelac™ Splash Drops;
Ο πατενταρισμένος μηχανισμός αντλίας του Artelac™ Splash Drops επιτρέπει στο διάλυμα σταγόνων να μην περιέχει συντηρητικά, αλλά ενδεχομένως να διαφέρει από τα φιαλίδια που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.


Γενική σημείωση: Πλένετε τα χέρια σας πριν από κάθε χρήση. Αποφύγετε την επαφή του ρύγχους του φιαλιδίου με τα δάχτυλά σας ή τα μάτια σας για να αποτρέψετε οποιαδήποτε πιθανή μόλυνση του διαλύματος ή τραυματισμούς στα μάτια.

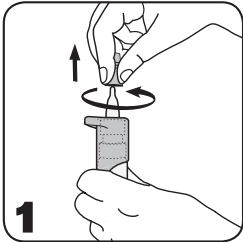


1. Πριν από κάθε χρήση, αφαιρέστε το ημιδιαφανές λευκό προστατευτικό κάλυμμα από την άκρη του φιαλιδίου με περιστροφική κίνηση.

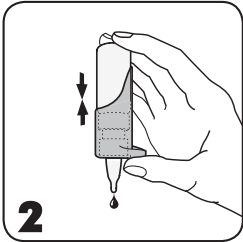

2. **Προσοχή! Πριν από την πρώτη χρήση και εάν το φιαλίδιο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο διάστημα:**
Στρέψτε το φιαλίδιο με το άκρο προς τα κάτω και πιέστε επανειλημμένα τον μηχανισμό της αντλίας μέχρι να απελευθερωθεί μια πρώτη σταγόνα.

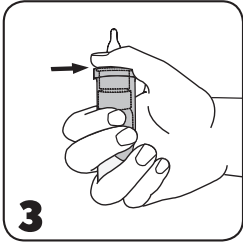

3. Κρατήστε το φιαλίδιο όπως παρουσιάζεται: Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο εργονομικό στήριγμα για τον αντίχειρα και κλείστε το κάτω μέρος με τα δάχτυλά σας. Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στο κάτω μέρος του φιαλιδίου.

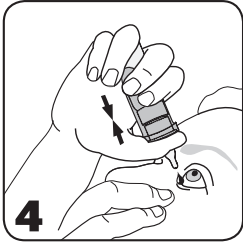

4. Γυρίστε το φιαλίδιο με το στόμιο προς τα κάτω και γείρετε ελαφρώς πίσω το κεφάλι σας. Τραβήξτε απαλά προς τα κάτω το κάτω βλέφαρο με ένα από τα δάχτυλα του ελεύθερου χεριού σας, και κρατήστε το φιαλίδιο κάθετα πάνω από το μάτι σας, όπως φαίνεται. Πιέστε απαλά την αντλία μέχρι να πέσει μία σταγόνα στο μάτι σας.

Στη συνέχεια κλείστε το μάτι σας και ανοιγοκλείστε το ώστε να απλωθεί η σταγόνα σε όλη την επιφάνεια του ματιού σας.

Αμέσως μετά τη χρήση, αποτινάξτε τυχόν υπολείμματα διαλύματος και επανατοποθετήστε το ημιδιαφανές λευκό καπάκι στο στεγνό πλέον ακροστόμιο του φιαλιδίου.

Λόγω του σχεδιασμού του φιαλιδίου, ένα μικρό υπόλειμμα του διαλύματος παραμένει μέσα σε αυτό. Ωστόσο, η συνολική αναγραφόμενη ποσότητα διαλύματος μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως από το φιαλίδιο.

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν Artelac™ Splash Drops:

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχετε υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Artelac™ Splash Drops:

- Τοπικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αγωγή θα πρέπει να διακόπτεται. Εάν αισθανθείτε επίμονη δυσφορία ή ερεθισμό, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Σημειώστε ότι κατά την αρχική χρήση ή τη χρήση μετά από κάποιο διάστημα, είναι απαραίτητη μια αρχική άντληση του διαλύματος. Κατά την άντληση του διαλύματος, το φιαλίδιο θα πρέπει να διατηρείται με το ακροστόμιο προς τα κάτω και μακριά από τα μάτια, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.
- Πληροφορίες ασφαλείας για ασθενείς με σοβαρή βλάβη του κερατοειδούς: Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί εναποθέσεις φωσφορικού ασβεστίου στον κερατοειδή κατά τη διάρκεια της αγωγής με φωσφορούχα προϊόντα για οφθαλμική χρήση.
- Μην ακουμπάτε το άκρο του φιαλιδίου στην επιφάνεια του ματιού, ώστε να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό της επιφάνειας του ματιού ή μόλυνση του διαλύματος.
- Μην αγγίζετε την άκρη του φιαλιδίου με τα δάχτυλά σας για να αποτρέψετε οποιαδήποτε πιθανή μόλυνση του διαλύματος.
- Μετά το άνοιγμα του φιαλιδίου μην το μοιραστείτε με κανέναν άλλον.
- Η μη προσεκτική χρήση του προϊόντος λόγω μη τήρησης των οδηγιών είναι πιθανό να έχει ως συνέπεια να γλιστρήσει το προϊόν από το χέρι σας και να προκαλέσει τραυματισμό στο μάτι.
- Μετά την εφαρμογή αποτινάξτε τυχόν υπολείμματα διαλύματος.
- Περιμένετε περίπου 15 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο οφθαλμικό προϊόν.
- Απορρίψτε το ιατροτεχνολογικό προϊόν 6 μήνες μετά το πρώτο άνοιγμά του.
- Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν η συσκευασία ή το φιαλίδιο έχει καταστραφεί.
- Το Artelac™ Splash Drops περιέχει μικρά πλαστικά μέρη που μπορούν να καταποθούν από μικρά παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας. Επομένως, το Artelac™ Splash Drops πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Το Artelac™ Splash Drops είναι κατάλληλο για χρήση με μαλακούς και σκληρούς φακούς επαφής.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένα.
- Με βάση τις τρέχουσες γνώσεις και την εμπειρία της αγοράς, αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από εγκύους, θηλάζουσες μητέρες και παιδιά.
- Εάν το παιδί σας αντιμετωπίζει ξηροφθαλμία, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο λιπαντικό για τα μάτια.

Πώς να αποθηκεύσετε το Artelac™ Splash Drops;

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία από +1 °C έως +25 °C.
Ο σχεδιασμός του φιαλιδίου σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το Artelac™ Splash Drops έως και 6 μήνες μετά το άνοιγμα.

Απόρριψη:

Το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή.

Συσκευασίες:

Το Artelac™ Splash Drops είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες οφθαλμικών σταγόνων των 10 ml χωρίς συντηρητικά.
Το Artelac™ Splash είναι διαθέσιμο επίσης σε εύχρηστη μορφή μονοδόσεων (αμπούλες) χωρίς συντηρητικά.

Επεξήγηση συμβόλων



Κατασκευαστής:
Dr. Gerhard Mann
chem.-pharm.
Fabrik GmbH
Brunsbütteler
Damm 165/173
13581 Berlin
Γερμανία



Σήμανση συμμόρφωσης
κατά CE

Σήμα CE με αριθμό
κοινοποιημένου
οργανισμού



Μοναδικό αναγνωριστικό
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος
GTIN (01) Αναγνωριστικό
προϊόντος
EXP (17) Ημερομηνία λήξης
LOT (10) Κωδικός παρτίδας



Όριο θερμοκρασίας



Προσοχή



Να μην χρησιμοποιείται
αν η συσκευασία
έχει υποστεί φθορά.
Συμβουλευτείτε τις
οδηγίες χρήσης



Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Κωδικός παρτίδας



Ημερομηνία κατασκευής



Ημερομηνία λήξης



Συμβουλευτείτε τις
οδηγίες χρήσης ή
συμβουλευτείτε τις
ηλεκτρονικές οδηγίες
χρήσης



Αποστειρώθηκε με χρήση
ασηπτικών τεχνικών
επεξεργασίας



Σύστημα μονού
αποστειρωμένου φραγμού

www.bausch.gr
www.bausch.com/IFU

Ημερομηνία έκδοσης:
Artelac™ Splash Drops, I931EU-07; (2025-06)